

## *DE Allgemeine Hinweise zum Alkoholtest - Gebrauchsanweisung*

Der Alkoholtest ist für den einmaligen Gebrauch konzipiert und dient der Bestimmung des Alkoholgehalts in der ausgeatmeten Luft. Mit diesem Test kann der Blutalkoholgehalt mit einer Genauigkeit von 0,2‰ (Promille), das heißt 0,1 mg/L in der ausgeatmeten Luft, ermittelt werden. Der Alkoholspiegel steigt in der Regel bis zu etwa einer Stunde nach dem Alkoholkonsum an. Weitere Faktoren wie individuelle Fitness, Konsumrate, Art des Alkohols, sowie die Aufnahme von Nahrung können den Alkoholspiegel beeinflussen.

### **Achtung!**

Die Ergebnisse dieses Alkoholtests können nicht als Beweismittel in Gerichtsverfahren verwendet werden, insbesondere nicht zur Feststellung des Rauschzustands. Sie sind allein verantwortlich für die Interpretation der Testergebnisse. Diese Ergebnisse können nicht verwendet werden, um die Ergebnisse von Tests anzufechten, die von oder auf deren Verlangen durchgeführt wurden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung des Produkts, die nicht den Anweisungen entspricht.

Der Hersteller und der Vertreiber übernehmen keine rechtliche Verantwortung für das Ergebnis des Tests.

Um ein möglichst genaues Ergebnis zu erhalten, sollte die Messung mindestens 15 Minuten nach dem letzten Alkoholkonsum durchgeführt werden. Rauchen und der Konsum bestimmter Lebensmittel und Getränke können das Ergebnis verändern. Auch in diesen Fällen ist es ratsam, mindestens 15 Minuten zu warten. In jedem Fall muss die Regel lauten:

**WENN SIE TRINKEN, MÜSSEN SIE NICHT FAHREN! WENN SIE MIT DEM AUTO FAHREN, MÜSSEN SIE NICHT TRINKEN!**

### *Komponenten*

Der Alkoholtest besteht aus einem Glasröhrchen, Adsorptionsgranulat, Filtern, Aluminiumfolie und zwei Schutzkappen.

### **Achtung!**

Die Bestandteile des Alkoholtests können bei unsachgemäßer Anwendung gefährlich sein. Das Glasrohr kann brechen und Verletzungen verursachen, andere Teile können verschluckt werden. Nach Gebrauch sollte der Test im Hausmüll entsorgt werden. Der verwendete Test stellt keine Umweltgefährdung gemäß den EU-Richtlinien dar. Es wird empfohlen, gebrauchte Tests nicht an Orten zu lassen, die für Unbefugte zugänglich sind.

### *Anweisungen:*

1. Drücken Sie auf die Kunststoffschutzkappen auf beiden Seiten des Alkoholtests, bis Sie Widerstand spüren, um die Schutzfolie zu durchstoßen.
2. Atmen Sie tief ein und blasen Sie Luft in Richtung der Pfeile auf dem Alkoholtester in das Mundstück (zweimal für ca. 10 Sekunden).  
Stellen Sie sicher, dass die Luft auf der anderen Seite des Alkoholtesters austritt.
3. Lesen Sie nach 2 Minuten spätestens jedoch nach 5 Minuten das Testergebnis ab.
4. Wenn sich die Farbe im mittleren Teil des Glasrohrs ändert, bedeutet das, dass Alkohol im Blut vorhanden ist.

5. Vergleichen Sie die Farbe des Alkoholtests mit der Skala auf der Verpackung. Die genauesten Ergebnisse erhält man bei Tageslicht. Ein Wert, der dem auf der Verpackung angegebenen Wert von 0,2 ‰ ähnelt, zeigt eine Blutalkoholkonzentration von 0,2 ‰ oder mehr an.

Ein Alkoholgehalt von 0,2 ‰ kann die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen und stellt eine Gefahr für Leben und Gesundheit sowie eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar.

#### **Aufmerksamkeit!**

Bitte halten Sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Blutalkoholhöchstmengen in Ihrem Land!

#### *Vorsichtsmaßnahmen:*

1. Bewahren Sie den Alkoholtest außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Die Entnahme der Messsubstanz aus dem Alkoholtest ist verboten.
3. Führen Sie die Messung nicht unmittelbar nach dem Einfüllen von alkoholhaltigem Scheibenreiniger durch, da die Dämpfe das Ergebnis verfälschen können.
4. Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Messsubstanz mit Augen und Haut.
5. Die Messsubstanz darf weder eingeatmet noch verschluckt werden.
6. Werfen Sie den Alkoholtest nicht ins Feuer.
7. Bei Kontakt der Messsubstanz mit den Augen, das Augenlid weit öffnen und gründlich mit Wasser ausspülen. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, ein Augenarztbesuch ist ratsam.
8. Bei Hautkontakt, die betroffene Stelle mit viel Wasser abspülen. Bei Hautirritationen (Rötungen, Ausschläge, allergische Reaktionen, Wunden) sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen und einen Dermatologen aufsuchen.
9. Bei Verschlucken der Messsubstanz viel Wasser trinken, jedoch keine Würgereaktion auslösen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
10. Bei Einatmung der Messsubstanz sofort an die frische Luft gehen. Gegebenenfalls ärztliche Hilfe aufsuchen.

Tipps zur Lagerung: 1. Vor Sonnenlicht und hohen Temperaturen schützen.

2. An einem trockenen und sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

#### ***HERGESTELLT IN der EU***

#### ***Autorisierter Händler:***

My Future Innovation SAS

Boulevard Dubouchage 37-41

06000 NICE Frankreich

E-Mail: [info@myfutureinnovation.com](mailto:info@myfutureinnovation.com)

Der Alkoholtest wird in Europa hergestellt.